

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/materac-rehabilitacyjny-nalesnik-sensoryczny-do-terapii-si-p-10603.html>



MATERAC REHABILITACYJNY - NALEŚNIK SENSORYCZNY DO TERAPII SI

Cena	399,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	PIANKOWE.PL
Dla szkoły/przedszkola	



Opis produktu

MATERAC REHABILITACYJNY - NALEŚNIK DO TERAPII SI

Materac rehabilitacyjny - naleśnik sensoryczny - materac został zaprojektowany z myślą o terapii sensorycznej. Dziecko należy precyzyjnie zawinąć w naleśnik - materac, aby zapewnić odpowiednie dociśnięcie i stymulowanie receptorów.

Zastosowanie materaca w terapii pozwala na zwiększenie świadomości własnego ciała, stymuluje układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. Produkt dedykowany jest głównie dzieciom z zaburzeniami SI oraz pozostałym według zaleceń terapeuty.

Pokrowiec materaca wykonany jest z materiału z powłoką PCV przeznaczonego dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji. Produkt posiada certyfikację jako wyrób medyczny.

Wymiary: 200 x 120 x 2 cm (dł. x szer. x wys.).

Tapicerka: materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW

Wypełnienie: średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia

Certyfikacja: **Wyrób medyczny**



Polecane zastosowanie:

- w salach integracji sensorycznej (SI) oraz salach terapeutycznych
- w salach zabaw dla dzieci
- w żłobku, w przedszkolu
- jako wyposażenie pokoju dziecięcego lub salki zabaw w domu

Specyfikacja materiału:

Pokrowiec:

- materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji:

- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania
- olejoodporny



Wypełnienie:

- średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia:
- posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
- posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® - klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi
- produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor pokrycia: ciemnoniebieski 5118 , ciemnozielony 6263

Czyszczenie i konserwacja

I. Czyszczenie i konserwacja

Tapicerkę należy czyścić powierzchniowo stosując dozwolone środki:

Rodzaj zabrudzenia	Dozwolone środki	Postępowanie
Codzienne zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	Czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).
Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	Delikatnie przecierać nasączonym tamponem. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji zawierające: - aktywny chlor – dichloroizocyjanuran sodu, max stężenie 10000 ppm - aktywny chlor - dwutlenek chloru w roztworze do 20 000 ppm - alkohol izopropylowy max stężenie 70 %	Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka.
Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.		

II. Informacje

Szamponować przy użyciu gąbki

Nie prać!!! (delikatne wyroby)

Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)

Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)

Nie czyścić chemicznie!!!

III. Warunki gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

- Trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.)
- Ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki
- Uszkodzenia wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzęta domowe i innych użytkowników
- Wady powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji
- Granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania.