

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/piankowy-bujak-banan-ksztaltka-rehabilitacyjna-p-10624.html>



PIANKOWY BUJAK BANAN - KSZTAŁTKA REHABILITACYJNA

Cena	309,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	NAL020A
Producent	PIANKOWE.PL
Dla szkoły/przedszkola	



Opis produktu

PIANKOWY BUJAK BANAN - KSZTAŁTKA REHABILITACYJNA

Wymiary: 80 x 30 x 50 cm (Dł. x Szer. x Wys.)

Wypełnienie: średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia

Tapicerka: Materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW

Bujak dla dzieci Banan to mebel, który doskonale sprawdzi się zarówno do zabawy, jak również do wypoczynku. Nowoczesny wygląd sprawia, że jest doskonałym dopełnieniem wyposażenia przestrzeni przeznaczonych dla dzieci. Bujak posiada stabilną konstrukcję, dzięki czemu jest bezpieczny podczas użytkowania go przez najmłodszych. Wykonany jest z materiału z powłoką PCV przeznaczonego dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji.

Produkt posiada certyfikację jako wyrób medyczny.

Polecane zastosowanie:

- jako wyposażenie dziecięcego pokoju
- w salach zabaw dla dzieci
- w żłobku, w przedszkolu, w szkole do zabaw ruchowych
- w kąciach dziecięcych w restauracjach
- w "hotelach" jako wyposażenie "Kids Club"

Specyfikacja materiału:

Pokrowiec: materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji:

- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania
- olejoodporny

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

**Wypełnienie: średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia**

- posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
- posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® – klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi
- produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej

Kształtki rehabilitacyjne są wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażone w deklarację zgodności producenta i opatrzone znakiem CE.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

Kolor pokrycia: biały 9001 , błękitny 5348 , niebieski 5154 , ciemnoniebieski 5118 , pastelowy róż 2077 , beżowy 1044 , jasnozielony 6156 , zielony 6248 , ciemnozielony 6263 , zielony medyczny 6021 , szary 7000 , ciemnoszary 7107 , czarny 9011 , żółty 1123 , pomarańczowy 1017 , różowy 3333 , fioletowy 5161 , czerwony 3104

Czyszczenie i konserwacja**I. Czyszczenie i konserwacja**

Tapicerkę należy czyścić powierzchniowo stosując dozwolone środki:

Rodzaj zabrudzenia	Dozwolone środki	Postępowanie
Codziennie zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	Czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia wilgoci).

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	detergentu). Delikatnie przecierać nasączonym tamponem koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu). Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka.
Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji zawierające: - aktywny chlor – dichloroizocyjanuran sodu, max stężenie 10000 ppm - aktywny chlor - dwutlenek chloru w roztworze do 20 000 ppm - alkohol izopropylowy max stężenie 70 %	

Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.

II. Informacje

Szamponować przy użyciu gąbki
Nie prać!!! (delikatne wyroby)
Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)
Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
Nie czyścić chemicznie!!!

III. Warunki gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

- Trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.)
- Ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki
- Uszkodzenia wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzęta domowe i innych użytkowników
- Wady powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji
- Granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się.
Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania.