

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/walizka-logopedyczna-rerek-log230-p-10464.html>

## WALIZKA LOGOPEDYCZNA REREK (LOG230)



Cena	<b>540,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>LOG230</b>

### Opis produktu

## WALIZECZKA LOGOPEDYCZNA REREK

### **REREK- walizeczka do terapii głoski R.**

**Zestaw jest przeznaczony do stosowania przez specjalistę-logopedę.**

#### **Stosowanie:**

W celu właściwego wykorzystania pomocy logopedycznych (TARGET - głoska R) zawartych w zestawie należy w procedurze diagnozy określić m. in.

- moment rozwojowy Pacjenta;
- ewentualny charakter zaburzenia, np. wady struktur - krótkie wędzidełko, wysklepione podniebienie, krótki język
- stopień wrażliwości;
- rozwój tych funkcji motorycznych, które mogą mieć wpływ na skuteczność dobranych narzędzi, np. napięcie okołotwarzowe, siłę i symetrię żuchwy;
- zakres elewacji języka.

Zacznij od przygotowania Pacjenta na interwencję intraoralną, nie zaczynaj pracy od wibratora. Rozpocznij od dołączonych szpatełek gąbkowych, potem przejdź do masażu języka szpatełką logopedyczną - od góry.

W przypadku problemów z elewacją:

Zastosuj szpatełkę do masażu - masaż od góry języka, szpatełką żółtą PREFER masuj od dołu po wędzidełko do góry i boków języka, za szpatełką FINE pracuj na koniec - możesz ją świetnie wykorzystać do ściągania z niej językiem cheeriosa!

Pamiętaj - kontakt języka z podniebieniem nie służy tylko do wywoływania głoski R, jest niezbędny w karmieniu i połykaniu i ma "umocowanie" psychologiczne.

REREK jest wibratorem wysokoamplitudowym, co oznacza, że uruchamiane pod językiem wibracje pozwolą na tyle "szarpnąć" językiem, aby wywołać głoskę R.

Może się to odbyć przy zastosowaniu odpowiedniej szpatełki. Szpatełki płaskie stosujemy u małych dzieci lub dla "wysokich" niestabilnych żuchw, łopatki wymagają większego rozwarcia. Gdy Pacjent lepiej reaguje na ziarnistość - zastosuj szpatełkę fakturowaną.

Wreszcie - gumki miofunkcjonalne; można je wykorzystać do ćwiczenia poczucia ułożenia języka na podniebieniu i w ćwiczeniach połykania, a wszystko w związku z elewacją języka.

Uwaga: tego narzędzia terapeutycznego należy używać przez cały czas pod nadzorem osoby dorosłej (lub specjalisty)

#### **W zestawie:**

- wibrator logopedyczny REREK
- szpatełki do wibratorów logopedycznych: PREFER, ŁYŻECZKA twarda, SZPATEŁKA PŁASKA GŁADKA, SZPATEŁKA PŁASKA



**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,  
NIP 7120165368, REGON 430362055  
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93  
E-mail: cezas@cezas.com.pl

---

FAKTUROWANA, TONGUE, FINE

- szpatałka do masażu logopedycznego
- gumki miofunkcjonalne
- szpatałki gąbkowe TOOTHETTE neutralne

Szpatałki nie zawierają ołowiu, ftalanów, PCV, BPA ani lateksu